

20-50
mmHg

PHASES INTENSIVE
ET MAINTIEN

DIURNE - NOCTURNE

STADES 1 ET 2

INDICATIONS

- LYMPHŒDÈME
DU MEMBRE INFÉRIEUR
- ŒDÈME DE LA CUISSE

SIMPLE D'UTILISATION

- Application autonome et
ajustements aisés par scratchs
- Entretien facile

CONFORTABLE

- Dispositif léger
- Texture douce*

PERSONNALISABLE

- Adaptable au volume de l'œdème
- Compression appliquée ajustable
- Association possible avec d'autres produits
pour ajuster le niveau de pression

Fiche de prise de mesures et informations
détaillées à télécharger sur www.sigvaris.com

UTILISATION POSSIBLE AVEC



COMPREFLEX
(voir page 54)

COMPREFLEX THIGH COMPONENT

DISPOSITIF DE COMPRESSION AJUSTABLE
POUR LA CUISSE



SCRATCHS



MATIÈRE
RESPIRANTE



*COMPOSITION

45% Coton - 23% Mousse de polyuréthane
21% Polyamide - 9% Néoprène - 2% Elasthanne

INCLUS

- Dispositif de compression ajustable pour la
cuisse COMPREFLEX THIGH COMPONENT
- Paire de sous couche de protection en coton
- Ceinture pour la taille

PRISE DE MESURES ET TAILLAGE

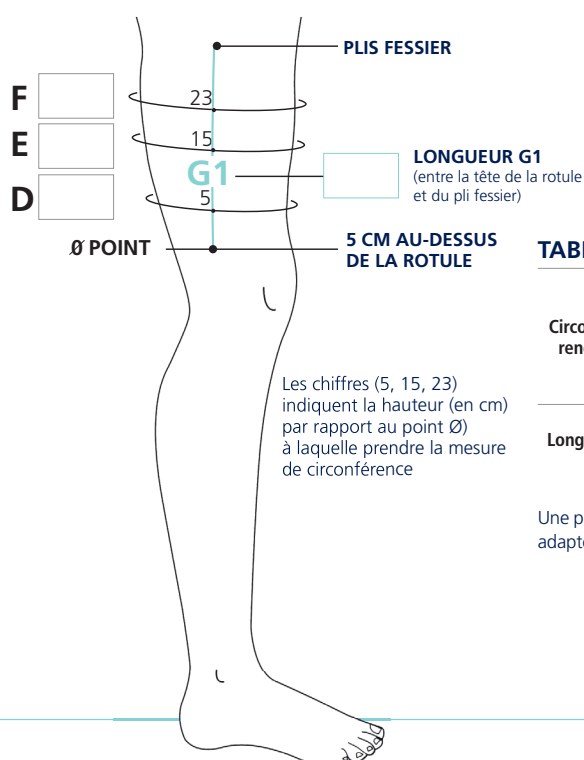


TABLEAU DE TAILLAGE (cm)

		SMALL	MEDIUM	LARGE	XLARGE				
Circonférences	F	48-58	56-66	64-74	74-84				
	E	43-53	51-61	58-68	68-78				
	D	38-48	46-56	53-63	63-73				
Longueur		NORMAL	LONG	NORMAL	LONG	NORMAL	LONG	NORMAL	LONG
	G1	20-24,9	25-30	20-24,9	25-30	20-24,9	25-30	20-24,9	25-30

Une prise de mesures par un professionnel de santé est indispensable pour garantir un niveau de compression adapté et une efficacité optimale

Pour commander, merci d'utiliser impérativement les codes à 13 chiffres sans oublier le "0".

	COLORIS	TAILLE	SMALL	MEDIUM	LARGE	XLARGE
CUISSÉ DROITE	Noir	NORMAL	0745129301743	0745129301828	0745129301903	0745129301965
	Noir	LONG	0745129301729	0745129301804	0745129301880	0745129301989
CUISSÉ GAUCHE	Noir	NORMAL	0745129301736	0745129301811	0745129301897	0745129301972
	Noir	LONG	0745129301712	0745129301798	0745129301873	0745129301958

CONSEILS D'UTILISATION



- Enfiler la sous couche de protection en coton sur la cuisse
- Enrouler les scratchs sur eux mêmes avant de positionner le produit
- Enfiler le COMPREFLEX TC sur la jambe. La partie textile avant permet un bon positionnement du produit et facilite sa mise en place
- Depuis le genou jusqu'au sommet de la cuisse, refermer les scratchs sur le membre. Ces derniers doivent être correctement positionnés : pas de chevauchement et d'espace entre eux
- Réajuster chaque scratch pour obtenir une pression efficace et confortable
- Placer la ceinture autour de la taille, elle peut être coupée à la longueur désirée
- Fixer la partie large de l'attache à la ceinture et fixer la partie étroite de l'attache sur le COMPREFLEX TC en ajustant la tension
- En cas d'usage du dispositif de compression ajustable pour le genou, enfiler COMPREFLEX KNEE en premier

Consultez les contre-indications de ce produit en page 12.