

Compreboot Standard Foot

DISPOSITIF DE COMPRESSION AJUSTABLE
POUR LE PIED ET LA CHEVILLE


PHASES INTENSIVE ET MAINTIEN

DIURNE - NOCTURNE

STADES 1 ET 2

INDICATIONS

- Œdème (en cas de Maladie Veineuse Chronique, immobilisation, post-chirurgie)
- Lymphœdème
- Lipœdème

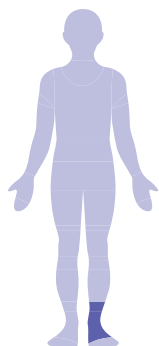

Jusqu'à
40
mmHg



SCRATCHS



MATIÈRE
RESPIRANTE



SIMPLE D'UTILISATION

- Installation facile
- Ajustements aisés par scratches
- Durable et lavable en machine

PRESSION AJUSTABLE

- Adaptable au volume de l'œdème
- Association possible avec d'autres produits

MATIÈRE DOUCE ET SOUPLE

- Dispositif fin et léger

COMPOSITION

67% Néoprène
30% Polyamide
3% Elasthanne

UTILISATION POSSIBLE AVEC



Compreflex
Standard Calf
(voir page 28)



Coolflex
Standard Calf
(voir page 36)




Fiche de prise de mesures et
informations détaillées à télécharger sur
www.sigvaris.com

Compreboot Standard Foot

DISPOSITIF DE COMPRESSION AJUSTABLE
POUR LE PIED ET LA CHEVILLE

PRISE DE MESURES ET TAILLAGE

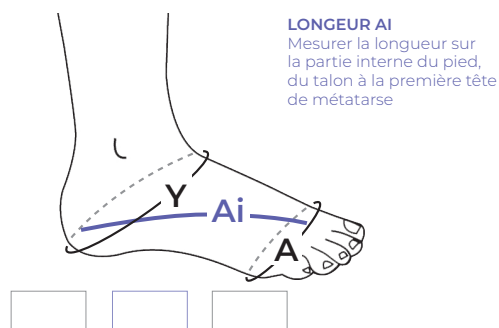

Compreboot Standard & Compreboot Plus (A-Y)

TABLEAU DE TAILLAGE (cm)

		SMALL		MEDIUM / LARGE		XLARGE / XXLARGE	
		REGULAR	LONG	REGULAR	LONG	REGULAR	LONG
Circonférences	Y	28-36 cm	28-36 cm	≤ 39 cm	≤ 39 cm	≤ 44 cm	≤ 44 cm
	A	22-26 cm	22-26 cm	≤ 30 cm	≤ 30 cm	≤ 33 cm	≤ 33 cm
Longueur	IAi	14-18 cm	19-23 cm	18-20 cm	23-25 cm	20-22 cm	25-27 cm

Une prise de mesures par un professionnel de santé est indispensable pour garantir un niveau de compression adapté et une efficacité optimale

Pour commander, merci d'utiliser impérativement les codes à 13 chiffres sans oublier le "0".

COLORIS	TAILLE	SMALL	MEDIUM / LARGE	XLARGE / XXLARGE
Noir	REGULAR	0745129284190	0745129284213	0745129284237
Noir	LONG	0745129284206	0745129284220	0745129284244

CONSEILS D'UTILISATION



- Ouvrir complètement le dispositif Compreboot Standard Foot



- L'étiquette cousue doit être située à l'extérieur du dispositif au niveau de la cheville
- Placer le talon dans l'ouverture prévue
- Refermer le dispositif grâce aux scratchs en ajustant la pression nécessaire

Consultez les contre-indications de ce produit en page 25.