

Compreflex Standard Calf & Foot

DISPOSITIF DE COMPRESSION AJUSTABLE
POUR LA JAMBE ET LE PIED

PHASES INTENSIVE
ET MAINTIEN

DIURNE - NOCTURNE

STADES 1 ET 2

INDICATIONS

- Œdème (en cas de Maladie Veineuse Chronique, immobilisation, post-chirurgie)
- Ulcère
- Lymphœdème
- Lipoœdème

SIMPLE D'UTILISATION

- Installation facile
- Ajustements aisés par scratchs
- Durable et lavable en machine

PRESSION AJUSTABLE

- Réglable selon 3 niveaux de pression
- Adaptable au volume de l'œdème
- Association possible avec d'autres produits

MATIÈRE DOUCE ET SOUPLE


- Dispositif léger
- Évacuation de l'humidité

COMPOSITIONS CALF :

37% polyamide - 27% mousse de polyuréthane - 26% coton
6% élasthanne - 4% polyester

COMPOSITIONS FOOT :

67% néoprène - 30% polyamide
3% élasthanne

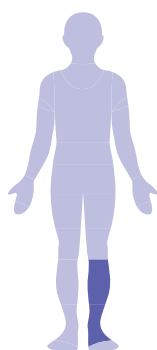

21-46
mmHg



SCRATCHS



MATIÈRE
RESPIRANTE



INCLUS

- Dispositif de compression ajustable pour la jambe Compreflex Standard Calf
- Dispositif de compression ajustable pour le pied Compreboot Standard Foot
- Paire de chaussettes protectrices en coton
- Indicateur de niveau de compression Accutab

UTILISATION POSSIBLE AVEC



Compreflex
Standard Thigh
(voir page 32)



Compreflex
Standard Knee
(voir page 30)




Fiche de prise de mesures et
informations détaillées à télécharger sur
www.sigvaris.com

Compreflex Standard Calf & Foot

DISPOSITIF DE COMPRESSION AJUSTABLE
POUR LA JAMBE ET LE PIED

PRISE DE MESURES ET TAILLAGE

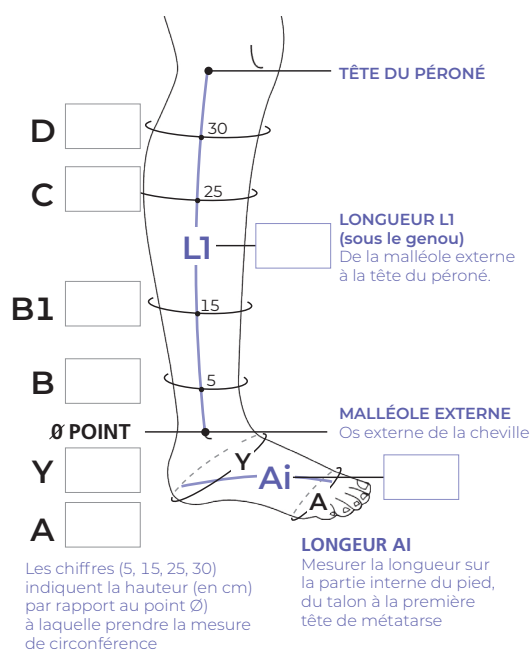

Compreflex Standard Calf (B-D)

TABLEAU DE TAILLAGE (cm)

		SMALL	MEDIUM	LARGE	XLARGE	XXLARGE
Circonférences	D	29-39 cm	34-44 cm	40-50 cm	46-56 cm	54-64 cm
	C	29-39 cm	34-44 cm	40-50 cm	46-56 cm	54-64 cm
	B1	24-34 cm	29-39 cm	34-44 cm	39-49 cm	44-55 cm
	B	19-26 cm	21-30 cm	26-36 cm	31-41 cm	36-46 cm
Longueur	L1	REGULAR: 30-33,9 cm		TALL: 34-42 cm		

Compreboot Standard Foot (A-Y)

TABLEAU DE TAILLAGE (cm)

		SMALL		MEDIUM / LARGE		X-LARGE / XX-LARGE	
		REGULAR	LONG	REGULAR	LONG	REGULAR	LONG
Circonférences	Y	28-36 cm	28-36 cm	≤ 39 cm	≤ 39 cm	≤ 44 cm	≤ 44 cm
	A	22-26 cm	22-26 cm	≤ 30 cm	≤ 30 cm	≤ 33 cm	≤ 33 cm
Longueur	IAi	14-18 cm	19-23 cm	18-20 cm	23-25 cm	20-22 cm	25-27 cm

Une prise de mesures par un professionnel de santé est indispensable pour garantir un niveau de compression adapté et une efficacité optimale.

Pour commander, merci d'utiliser impérativement les codes à 13 chiffres sans oublier le "0".

COLORIS	TAILLE	SMALL	MEDIUM	LARGE	XLARGE	XXLARGE
Noir	REGULAR	0745129284695	0745129284718	0745129284732	0745129284756	0745129284770
Noir	TALL	0745129284701	0745129284725	0745129284749	0745129284763	0745129284787

CONSEILS D'UTILISATION



- Enfiler la chaussette protectrice en coton.
- Ouvrir complètement le dispositif Compreboot Standard Foot.
- L'étiquette cousue doit être située à l'extérieur du dispositif au niveau de la cheville.
- Placer le talon dans l'ouverture prévue.
- Refermer le dispositif grâce aux scratchs.

- Préparer le Compreflex Standard Calf en enroulant les scratchs sur eux-mêmes.
- Enfiler le Compreflex sur la jambe. La partie textile avant permet un bon positionnement du produit et facilite sa mise en place.
- Du bas vers le haut, refermer les scratchs sans exercer de compression. Ces derniers doivent être correctement positionnés : pas de chevauchement et d'espace entre eux.

- Utiliser les Accutab afin de délivrer le niveau de pression souhaitée : Fixer une languette Accutab à chaque extrémité des scratchs, tirer chaque attache velcro au niveau de l'intervalle de compression souhaité indiqué sur la languette.

Consultez les contre-indications de ce produit en page 25.