

Compreflex Standard Knee

DISPOSITIF DE COMPRESSION AJUSTABLE
POUR LE GENOU


PHASES INTENSIVE
ET MAINTIEN

DIURNE - NOCTURNE

STADES 1 ET 2

INDICATIONS

- Œdème (en cas de Maladie Veineuse Chronique, immobilisation, post-chirurgie)
- Lymphœdème
- Lipœdème

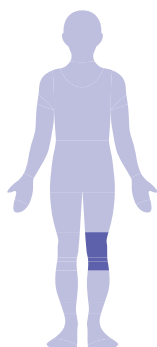

21-46
mmHg



SCRATCHS



MATIÈRE
RESPIRANTE



SIMPLE D'UTILISATION

- Installation facile
- Ajustements aisés par scratchs
- Durable et lavable en machine

PRESSION AJUSTABLE

- Réglable selon 3 niveaux de pression
- Adaptable au volume de l'œdème
- Association possible avec d'autres produits

MATIÈRE DOUCE ET SOUPLE

- Dispositif léger
- Évacuation de l'humidité

COMPOSITION

42% Mousse de polyuréthane
50% Polyamide
8% Elasthanne

UTILISATION POSSIBLE AVEC



Compreflex
Standard Calf
(voir page 28)



Compreflex
Standard Thigh
(voir page 32)

INCLUS

- Dispositif de compression ajustable pour le genou Compreflex Standard Knee
- 1 Lanière de fixation à scartchs en forme de papillon
- Indicateur de niveau de compression Accutab




Fiche de prise de mesures et
informations détaillées à télécharger sur
www.sigvaris.com

Compreflex Standard Knee

DISPOSITIF DE COMPRESSION AJUSTABLE
POUR LE GENOU

PRISE DE MESURES ET TAILLAGE

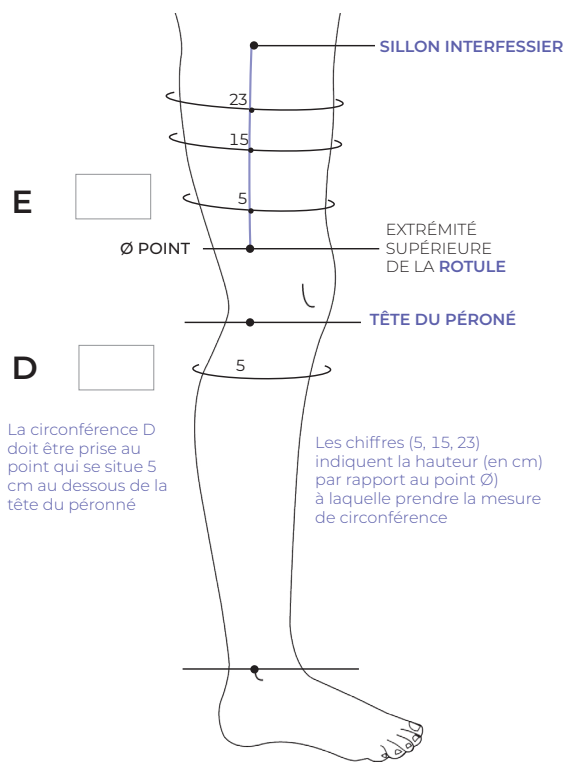

Compreflex Standard Knee (D-E)

TABLEAU DE TAILLAGE (cm)

		SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Circonférences	E	38-48 cm	46-56 cm	53-63 cm	58-73 cm
	D	29-39 cm	34-44 cm	39-49 cm	44-65 cm

Une prise de mesures par un professionnel de santé est indispensable pour garantir un niveau de compression adapté et une efficacité optimale

Pour commander, merci d'utiliser impérativement les codes à 13 chiffres sans oublier le "0".

COLORIS	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Noir	0745129283674	0745129283681	0745129283698	0745129283704

CONSEILS D'UTILISATION



- Enrouler les scratchs sur eux-mêmes avant de positionner le produit
- Enfiler le Compreflex sur la jambe jusqu'au genou. L'étiquette du produit se trouve en haut à l'arrière de la jambe et est orientée vers l'extérieur.
- Du bas vers le haut, refermer les scratchs sans exercer de compression. Ces derniers doivent être correctement positionnés : pas de chevauchement et d'espace entre eux
- Utiliser les Accutab afin de délivrer le niveau de pression souhaitée : Fixer une languette Accutab à chaque extrémité des scratchs, tirer chaque attache velcro au niveau de l'intervalle de compression souhaité indiqué sur la languette
- Si nécessaire, vous pouvez placer la lanière en forme de papillon fournie, sur la rotule pour couvrir les éventuels espaces entre les scratchs

Consultez les contre-indications de ce produit en page 25.