

## Pour vous accompagner

### UN SITE INTERNET DÉDIÉ

Découvrez tous nos conseils santé pour vos jambes sur le site [www.sigvaris.com](http://www.sigvaris.com)

Retrouvez aussi des vidéos exclusives, des podcasts d'experts et des articles pédagogiques pour mieux comprendre la maladie veineuse et pour mieux vivre votre traitement par compression.



Suivez-nous également sur  

### SERVICE CONSOMMATEURS

Appelez-nous au :

**0 969 320 966** Service gratuit + prix appel

du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 14h-18h

Écrivez-nous à : [services.consommateurs@sigvaris.com](mailto:services.consommateurs@sigvaris.com)

## Nos recommandations

- ▶ **Lavez les produits avant la première utilisation et quotidiennement.**
- ▶ **N'utilisez pas les produits sur une peau lésée.**

- ▶ Une prise de mesures - à chaque délivrance - par un professionnel de santé est indispensable pour garantir un niveau de compression adapté et une efficacité optimale.
- ▶ Les produits doivent être enfilés de préférence dès le matin sur une peau propre et sèche.
- ▶ Ne réalisez pas de modification sur le produit.
- ▶ Privilégiez l'utilisation de crème hydratante avant le coucher plutôt que le matin avant l'enfilage des produits car elle peut les endommager.

### POUR ENFILER VOTRE PRODUIT

- 1 Introduisez la main à l'intérieur de votre produit et pincez le talon.
- 2 Retournez votre produit jusqu'à hauteur du talon.
- 3 Introduisez votre pied dans le produit en positionnant correctement le talon.
- 4 Déroulez le produit sur vos jambes.

### LES TRUCS EN +

**PENSEZ-Y !** Massez vos jambes de bas en haut, afin de bien répartir le textile et favoriser le retour veineux. Bien en place, votre produit est plus efficace ! **ROLLY**, une solution unique d'aide à l'enfilage et au retrait des produits. Demandez conseil à votre professionnel de santé.



Retrouvez aussi des vidéos exclusives, des podcasts d'experts et des articles pédagogiques pour mieux comprendre la maladie veineuse et pour mieux vivre votre traitement par compression.



### POUR ENTREtenir VOTRE PRODUIT



Lavez en machine, programme délicat à 30°C.



N'utilisez pas d'assouplissant.



Séchez loin de toute source de chaleur.

- ▶ Pour prolonger la vie de vos produits, utilisez un filet de lavage.

### Indications

#### ▶ ANTI-THROMBOSE

- Bas de compression médicale entre 15,1 et 20 mmHg (entre 20,1 et 27 hPa, classe I)**
- Prévention de la thrombose veineuse dans un contexte chirurgical (en association avec un traitement pharmacologique ou seul en cas de contre-indications) ou médical (hors accident vasculaire cérébral) chez les patients en décubitus prolongé.
- Prévention de la thrombose veineuse en cas d'intervention chirurgicale à risque thromboembolique veineux (la compression est utile en association au traitement anti-coagulant, ou seule lorsque ce traitement est contre-indiqué).
- Prévention de la thrombose veineuse dans les situations à risque (infections avec fièvre prolongée, cancers à risque de thrombose, insuffisances cardiaques, antécédents de thrombose veineuse).

#### ▶ EXPERT

- Bas de compression médicale entre 20,1 et 36 mmHg (entre 27,1 et 48 hPa, classe II)**
- Varices de plus de 3 mm (C2).
- Après chirurgie ou sclérothérapie des varices de plus de 3 mm, pendant 4 à 6 semaines.
- Œdème veineux chronique (C3).
- Troubles trophiques (pigmentation, eczéma) d'origine veineuse (C4a).
- Troubles trophiques chroniques (lipodermatosclérose ou hypodermite d'origine veineuse, atrophie blanche) d'origine veineuse (C4b chronique).
- Troubles trophiques d'origine veineuse avec ulcère cicatrisé (C5).
- Traitement de la thrombose veineuse superficielle du membre inférieur, le plus tôt possible après le diagnostic (en association au traitement anti-thrombotique si celui-ci est indiqué ou seul).
- Traitement de la thrombose veineuse profonde du membre inférieur, à la phase aiguë, le plus tôt possible après le diagnostic (en association avec le traitement pharmacologique ou seul en cas de contre-indications).

- Prévention du syndrome post-thrombotique après une thrombose veineuse profonde proximale, pendant 2 ans.
- Lymphoedème (en deuxième intention à la phase décongestive, et en première intention à la phase de maintien). La pression retenue est la plus forte supportée par le patient. Elle peut être atteinte par superposition de plusieurs bas, sans limite.
- Prévention de la thrombose veineuse pendant la grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après une césarienne) en cas d'affection veineuse chronique associée.
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures.

#### ▶ 504

- Bas de compression médicale supérieure à 36 mmHg (au-dessus de 48 hPa, classe IV)**
- Troubles trophiques d'origine veineuse avec ulcère cicatrisé (C5).
- Traitement de l'ulcère actif (C6) jusqu'à cicatrisation complète.
- Prévention du syndrome post-thrombotique après une thrombose veineuse profonde proximale, pendant 2 ans.
- Lymphoedème (en deuxième intention à la phase décongestive et en première intention à la phase de maintien). La pression retenue est la plus forte supportée par le patient. Elle peut être atteinte par superposition de plusieurs bas, sans limite.
- Prévention de la thrombose veineuse pendant la grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après une césarienne) en cas d'affection veineuse chronique associée.
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures.

### Contre-indications

Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6, microangiopathie diabétique évoluée pour les bas délivrant une pression > 30 mmHg, phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), thrombose septique, intolérance au produit.

### Précautions d'emploi

En cas d'AOMI avec un IPS > 0,6 et < 0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques doit être effectuée.

En cas de douleur ou d'inconfort retirez le produit et consultez votre professionnel de santé. Tout incident grave survenu en lien avec le produit devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

# sigvaris



\*Notice d'utilisation incluse

AT2 - EXPERT - 504  
Guide pratique de la compression\*

## Un savoir-faire reconnu

Au sein de SIGVARIS GROUP nous pensons qu'il est fondamental d'avoir le bon partenaire santé à ses côtés. C'est pourquoi nous nous employons à proposer un ensemble de solutions complémentaires, couvrant toutes les exigences en matière de compression.

Nos offres reposent sur des marques répondant à des besoins distincts et à des pathologies différentes (insuffisance veineuse chronique, lymphœdème, thrombose veineuse profonde), et capitalisent sur nos 150 ans d'expertise médicale. Chacune de nos marques a été soigneusement conçue pour proposer la meilleure solution aux femmes et aux hommes porteurs de compression.

Engagés dans le développement de réponses médicales pertinentes, nous innovons sans cesse pour aider les individus à se sentir mieux. Tous les jours.

CONCEPTION,  
FABRICATION,  
COMMERCIALISATION :  
DU 100 % FRANÇAIS !



## Les atouts de la gamme sigvaris

### ► Efficace :

- Pression dégressive tout au long de la jambe.
- Possibilité de couvrir toutes les morphologies\*.

### ► Confortable et facile à enfiler :

- Forme anatomique intégrée dès la conception du produit.
- Bande auto-fixante qui présente une bonne tolérance cutanée<sup>(2)</sup>.



### ► Un large choix de produits pour chaque situation de vie.

\*avec les gammes ESSENTIEL Semi-transparent et ESSENTIEL Microfibre

## La compression comment ça marche ?

La compression médicale est le traitement de base des maladies veineuses et lymphatiques<sup>(1)</sup>. Les produits de compression médicale (chaussettes, bas et collants) sont des solutions thérapeutiques qui contribuent à améliorer le retour veineux. Ils exercent une pression active le long de la jambe favorisant la circulation veineuse et le retour du sang vers le cœur.

► Les conditions d'utilisation et de renouvellement sont à demander à votre prescripteur (médecin, infirmier etc...).

## EXPERT

- EXPERT est une offre de classe 3 adaptée aux pathologies les plus sévères.
- Bande auto-fixante qui respecte les peaux sensibles<sup>(2)</sup>.
- Facilité d'enfilage : une construction brevetée.



La construction et la forme spécifique du produit (talon, mollet et haut de cuisse adaptés) assurent la facilité d'enfilage tout en garantissant une forte compression<sup>(5)</sup>.

### LES MODÈLES



Chaussettes\*



Bas auto-fixants\*

\*Existe en pieds ouverts pour les modèles HOMME

## 504

- Produit conçu pour répondre spécifiquement au traitement des stades avancés de la maladie veineuse.
- Textile composé de gomme naturelle et de polyamide.

### LES MODÈLES



Chaussettes



Bas cuisse



## ANTI-THROMBOSE

Les chaussettes et bas anti-thrombose sont indiqués dans la prévention de la thrombose veineuse profonde, dans un contexte médical ou chirurgical. Ils peuvent être portés dans le cadre de l'utilisation d'un bistouri électrique conformément au respect de la notice du fabricant de ce dernier<sup>(3)</sup>.

### ► Confort

- Bande auto-fixante qui respecte les peaux sensibles<sup>(2)</sup>.
- Pied ouvert.
- Construction spécifique qui favorise le confort en position allongée<sup>(6)</sup>.

### ► Douceur<sup>(4)</sup>

Texture douce pour un contact agréable avec la peau.

### LES MODÈLES



Chaussettes Bas auto-fixants

Les produits de compression médicale Sigvaris et Rolly sont des dispositifs médicaux de classe de risque I (règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS. Ces dispositifs sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Lisez attentivement la notice d'utilisation. Demandez conseil à votre professionnel de santé.

(1) HAS. Dispositifs de compression médicale à usage individuel - Utilisation en pathologies vasculaires. Septembre 2010. (2) Bonne tolérance cutanée chez 90% des volontaires - Études CERT, CHU Saint-Jacques de Besançon auprès de 30 personnes - 2008. (3) - Éloignement du bas d'au minimum 10 cm par rapport au bistouri, pour ne pas risquer d'inflammation du bas au contact de l'électrode du bistouri - Isolation du patient au regard de la table opératoire par des procédés classiques (le bas ne constitue pas lui-même un isolant et ne doit donc pas être utilisé à cette fin) - En utilisation monopolaire du bistouri, l'électrode neutre ne doit pas toucher le bas. Produit testé selon la norme EN 1149-2 (détermination de la résistance électrique verticale). (4) Douceur : étude interne réalisée sur 13 personnes - 2019. (5) Brevet EP2405782 délivré le 12.06.2013. (6) Couture de la dentelle positionnée sur le côté pour favoriser le confort en position allongée.



UKRP - SIGVARIS BRITAIN LTD,  
1 Imperial Court,  
Magellan Close,  
Andover SP10 5NT



© Copyright février 2023 by SIGVARIS, Saint-Just Saint-Rambert. Sigvaris, SIGVARIS GROUP and their products are registered trademarks of SIGVARIS AG, CH-9014, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide. SIGVARIS - ZI Sud d'Andrézieux - rue B. Thimonnier 42170 St-Just St-Rambert - France

