

POUR ENTRETENIR VOTRE PRODUIT



Lavez en machine,
programme délicat à 30°C.



N'utilisez pas
d'assouplissant.



Séchez loin de toute
source de chaleur.

- Pour prolonger la vie de vos produits, utilisez un filet de lavage.
- Le respect des conditions d'utilisation et d'entretien indiquées dans cette notice, permet aux produits de compression médicale Sigvaris d'assurer leur performance pendant 6 mois minimum.

Indications

- **Bas de compression médicale entre 10 et 15 mmHg (entre 13 et 20 hPa, classe I)**
 - Troubles fonctionnels et douleurs de l'insuffisance veineuse, liés à la station debout prolongée.
 - Mauvaise acceptabilité du patient au port d'un bas de classe 2.
 - En superposition pour atteindre des pressions supérieures.
- **Bas de compression médicale entre 15,1 et 20 mmHg (entre 20,1 et 27 hPa, classe II)**
 - Prévention de la thrombose veineuse dans un contexte chirurgical (en association avec un traitement pharmacologique ou seul en cas de contre-indications) ou médical (hors accident vasculaire cérébral) chez les patients en décubitus prolongé.
 - Varices de plus de 3 mm (C2).
 - Après chirurgie ou sclérothérapie de varices de plus de 3 mm, pendant 4 à 6 semaines.
 - Prévention de la thrombose veineuse en cas d'intervention chirurgicale à risque thrombo-embolique veineux (la compression est utile en association au traitement anticoagulant, ou seule lorsque ce traitement est contre-indiqué).
 - Prévention de la thrombose veineuse dans les situations à risque (infections avec fièvre prolongée, cancers à risque de thrombose, insuffisances cardiaques, antécédents de thrombose veineuse).
 - Prévention de la thrombose veineuse pendant la grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après une césarienne).
 - En superposition pour atteindre des pressions supérieures.
- **Bas de compression médicale entre 20,1 et 36 mmHg (entre 27,1 et 48 hPa, classe III)**
 - Varices de plus de 3 mm (C2).
 - Après chirurgie ou sclérothérapie des varices de plus de 3 mm, pendant 4 à 6 semaines.
 - Œdème veineux chronique (C3).
 - Troubles trophiques (pigmentation, eczéma) d'origine veineuse (C4a).
 - Troubles trophiques chroniques (lipodermatosclérose ou hypodermite d'origine veineuse, atrophie blanche) d'origine veineuse (C4b chronique).

- Troubles trophiques d'origine veineuse avec ulcère cicatrisé (C5).
- Traitement de la thrombose veineuse superficielle du membre inférieur, le plus tôt possible après le diagnostic (en association au traitement anti-thrombotique si celui-ci est indiqué ou seul).
- Traitement de la thrombose veineuse profonde du membre inférieur, à la phase aiguë, le plus tôt possible après le diagnostic (en association avec le traitement pharmacologique ou seul en cas de contre-indications).
- Prévention du syndrome post-thrombotique après une thrombose veineuse profonde proximale, pendant 2 ans.
- Lymphoedème (en deuxième intention à la phase décongestive, et en première intention à la phase de maintien). La pression retenue est la plus forte supportée par le patient. Elle peut être atteinte par superposition de plusieurs bas, sans limite.
- Prévention de la thrombose veineuse pendant la grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après une césarienne) en cas d'affection veineuse chronique associée.
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures.

► Bas de compression médicale supérieure à 36 mmHg (au-dessus de 48 hPa, classe IV)

- Troubles trophiques d'origine veineuse avec ulcère cicatrisé (C5).
- Traitement de l'ulcère actif (C6) jusqu'à cicatrisation complète.
- Prévention du syndrome post-thrombotique après une thrombose veineuse profonde proximale, pendant 2 ans.
- Lymphoedème (en deuxième intention à la phase décongestive et en première intention à la phase de maintien). La pression retenue est la plus forte supportée par le patient. Elle peut être atteinte par superposition de plusieurs bas, sans limite.
- Prévention de la thrombose veineuse pendant la grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après une césarienne) en cas d'affection veineuse chronique associée.

Contre-indications

Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6, microangiopathie diabétique évoluée pour les bas délivrant une pression > 30 mmHg, phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), thrombose septique, intolérance au produit.

Précautions d'emploi

En cas d'AOMI avec un IPS > 0,6 et < 0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risque doit être effectuée.

En cas de douleur ou d'inconfort retirez le produit et consultez votre professionnel de santé. Tout incident grave survenu en lien avec le produit devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Effets indésirables secondaires connus : la bande auto-fixante peut entraîner des réactions cutanées ou irritations telles que rougeurs, cloques, démangeaisons, brûlures.

sigvaris


Une gamme complète

	FEMME	HOMME
Essentiel Confortable et facile à porter au quotidien	SEMI-TRANSPARENT	MICROFIBRE
		COTON
Styles Look tendance	TRANSPARENT	COLORS
	MOTIFS (Plumetis, Carreaux, Mosaïque)	
	OPAQUE	MARINIÈRE
	COLORS	
	MARINIÈRE	
Active Technique et multi-activités	CONFORT CHALEUR	CONFORT FRAÎCHEUR*
	CONFORT FRAÎCHEUR*	LOISIRS
	LOISIRS	COTON BIO 55%**
	COTON BIO 55%**	RÉSISTANT
	COTON	
	RÉSISTANT	
Maternité	Collant Maternité	

Nos recommandations

- **Lavez les produits avant la première utilisation et quotidiennement.**
- **N'utilisez pas les produits sur une peau lésée.**
- Une prise de mesures - à chaque délivrance - par un professionnel de santé est indispensable pour garantir un niveau de compression adapté et une efficacité optimale.
- Les produits doivent être enfilés de préférence dès le matin sur une peau propre et sèche.
- Ne réalisez pas de modification sur le produit.
- Privilégiez l'utilisation de crème hydratante avant le coucher plutôt que le matin avant l'enfilage des produits car elle peut les endommager.

POUR ENFILER VOTRE PRODUIT

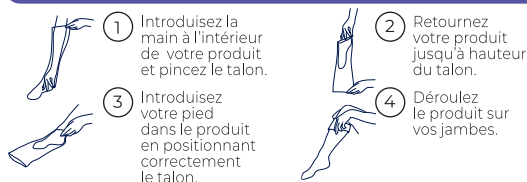

POUR LE COLLANT MATERNITÉ



Astuce pour le collant : Enfilez une jambe après l'autre jusqu'au genou, puis jusqu'à mi-cuisse. Positionnez ensuite le produit au niveau de l'entrejambe et terminez en remontant la ceinture sur le ventre. Retrouvez notre vidéo d'aide à l'enfilage sur notre site www.sigvaris.com

La compression comment ça marche ?

La compression médicale est le traitement de base des maladies veineuses et lymphatiques⁽¹⁾. Les produits de compression médicale (chaussettes, bas et collants) sont des solutions thérapeutiques qui contribuent à améliorer le retour veineux. Ils exercent une pression active le long de la jambe favorisant la circulation veineuse et le retour du sang vers le cœur.

- Les conditions d'utilisation et de renouvellement sont à demander à votre prescripteur (médecin, infirmier, sage-femme etc...).

LES MODÈLES



*Existe en pieds ouverts **Uniquement pour Femme

Vous êtes enceinte ?



- Conçu pour les femmes enceintes, le collant Maternité suit l'évolution du ventre tout au long de la grossesse⁽¹⁾.

COLLANT MATERNITÉ⁽¹⁾

- Ceinture évolutive
- Soutien ventral
- Existe en transparent et opaque

Après l'accouchement...

Continuez à veiller sur vos jambes, un risque accru de thrombose veineuse profonde demeure jusqu'à la 12^e semaine après l'accouchement⁽²⁾. Pendant quelques mois, vos jambes sont aussi plus vulnérables à l'insuffisance veineuse.

Pour vous accompagner...

UN SITE INTERNET DÉDIÉ

Découvrez toutes nos solutions de compression médicale sur le site sigvaris.com.

LE CLUB PRIVÉ ET GRATUIT SIGVARIS ET MOI

L'inscription est 100 % gratuite et rapide !

Suivez-nous également sur



SERVICE CONSOMMATEURS

Appelez-nous au :

0 969 320 966

Service gratuit
+ prix appel

du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 14h-18h



Écrivez-nous à :

services.consommateurs@sigvaris.com

Veiller à conserver l'étiquette de la boîte d'emballage de votre produit où figure le numéro de lot en cas de réclamation à notre service consommateurs.

Les produits de compression médicale Sigvaris sont des dispositifs médicaux fabriqués par SIGVARIS SAS. Ces dispositifs sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lisez attentivement la notice d'utilisation. Demandez conseil à votre professionnel de santé.

⁽¹⁾ Fraîcheur/Effet rafraîchissant : Par un phénomène de refroidissement évaporatif selon les résultats du rapport d'essai 23.11.0006, fait selon la spécification d'essai DIN SPEC 69019 par le laboratoire Hohenstein - Mai 2023.

⁽²⁾ "Coton Bio 55%": A minima 55% de coton biologique dans l'ensemble des références chaussettes homme et femme.

⁽¹⁾ Ceinture évolutive : matière extensible utilisée dans la ceinture - Etude réalisée par Sigvaris auprès de 17 femmes enceintes entre 3 et 8 mois de grossesse - Juillet 2018. Soutien ventral optimisé : 76,5% de satisfaction - Etude réalisée par Sigvaris auprès de 17 femmes enceintes entre 3 et 8 mois de grossesse - Juillet 2018

⁽²⁾ Olié V et al. Maladie veineuse thromboembolique pendant la grossesse et le post-partum, France, 2009-2014, www.invs.sante.be/2016/7-8/2016-7-8-6.html

⁽³⁾ HAS. Dispositifs de compression médicale à usage individuel - Utilisation en pathologies vasculaires. Septembre 2010.



Septembre 2025 © Copyright by SIGVARIS SAS, Saint-Just-Saint-Rambert, France. Sigvaris, SIGVARIS GROUP and their products are registered trademarks of SIGVARIS AG, CH-9014, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide.

SIGVARIS SAS - ZI Sud d'Andrézieux - rue B. Thimonnier
42170 St-Just-St-Rambert - France



Produit fabriqué
sous système
de Management
de la Qualité certifié
AFAQ ISO 13485

SIGVARIS
GROUP