

day on mars – 18-040 – FRANCE – MEDICA coton-bandeau

Modifié le 06/11/2020 à 11:49

PRODUCTION - Relecture N° : 11

Format : 225 x 75 mm

Code : 132352

Couleurs :

 Cyan
 Magenta
 Jaune
 Noir

 Tracé simplifié (Découpe)

RECTO

Demandez conseil à votre professionnel de santé, lisez attentivement la notice.

	Environ
Largeur ⁽¹⁾	10 cm
Longueur ⁽²⁾	4 m

⁽¹⁾width / Breite / Breite / Largura / Ancho / Πλάτος / العرض / الطول
⁽²⁾length / Länge / Länge / Comprimento / Longitud / μήκος / الطول

INDICATIONS

- Œdème post-thrombotique
- Œdème variqueux simple
- Ulcère
- Œdème non induré
- Œdème post-traumatique
- Œdème lymphatique



sigvaris



DISPOSITIF MÉDICAL DE COMPRESSION
COMPRESSIVE MEDICAL DEVICE
MEDISCH COMPRESSIEHULPMIDDEL
MEDIZINISCHES PRODUKT ZUR
KOMPRESSION
DISPOSITIVO MÉDICO DE COMPRESSÃO
DISPOSITIVO MÉDICO DE COMPRESIÓN
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

نظام ضم غط طبي

ŒDEMA BANDAGE
ANTI-OEDEEMVERBAND
KOMPRESSIONSBINDE
FAIXA ANTI-EDEMA
BANDA ANTIEDEMA
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΔΗΜΑΤΟΣ

شریط مضاد للآستسقاء

day on mars – 18-040 – FRANCE – MEDICA coton-bandeau

Modifié le 06/11/2020 à 11:49

PRODUCTION - Relecture N° : 11

Format : 225 x 75 mm

Code : 132352

Couleurs :

 Cyan
 Magenta
 Jaune
 Noir

 Tracé simplifié (Découpe)

VERSO

NOTICE D'UTILISATION

Les caractéristiques spéciales de la bande anti-œdème facilitent la pose et évitent les plis, particulièrement au niveau de la cheville et du genou.

Dérouler la bande d'une main, avec une légère pression. **A** De l'autre, appliquer la bande sur la jambe en tirant légèrement la partie supérieure **B** vers le haut. Fixer la bande avec du scotch ou du sparadrap.


N'utilisez pas les produits sur une peau lésée.

COMMENT ÇA MARCHE ?

En épousant parfaitement le membre fragilisé, la bande permet de contrôler la pression exercée afin de s'adapter à l'évolution de l'œdème.



Laver avec un savon neutre - Rincer et essorer dans une serviette - Poser à plat pour le séchage (ne pas suspendre), loin de toutes sources de chaleur - Repasser sans étirer.

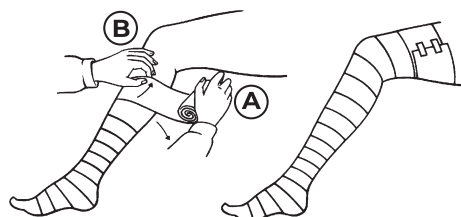

Contactez-nous !

0 969 320 966

Service gratuit
+ prix appel



F FRANCE ONLY

Retrouvez tous nos conseils
et toutes nos offres sur

www.sigvaris.com



Les produits de compression médicale Sigvaris sont des dispositifs médicaux de classe de risque I (règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS. Contre-indication : Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6, microangiopathie diabétique évoluée pour les bandes délivrant une pression > 30 mmHg, phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), thrombose septique, intolérance au produit. Précautions d'emploi: En cas d'ACMI avec un IPS > 0,6 et < 0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques doit être effectuée. En cas de douleur ou d'inconfort retirez le produit et consultez votre professionnel de santé. Tout incident grave survenu en lien avec le produit devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi. Ces dispositifs sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lisez attentivement la notice d'utilisation. Demandez conseil à votre professionnel de santé. Date de publication juin 2020 - Version 1 - 132352 - Sigvaris is a registered trademark of SIGVARIS AG, St. Gallen / Switzerland, in many countries worldwide. © Copyright 2020, by SIGVARIS - St-Just St-Rambert, France - Fabricant / Manufacturer: SIGVARIS - ZI Sud d'Andrézieux - rue B. Thimonnier 42170 St-Just St-Rambert.

132352 - version 4 - 11 2020