

## Venoped by Sigvaris - Informations d'utilisation



SIGVARIS - Z.I. Sud d'Andrézieux - Rue B. Thimonnier BP 60223 – 42170 St-Just St-Rambert France

Les semelles Venoped aident à activer le retour veineux lorsque vous marchez (travail, voyages, loisirs) et participent à soulager vos jambes\*.

\*Seiter H et al. Evaluation d'une nouvelle semelle veineuse. Angiologie 2001 ; Vol. 53, n°3, pp. 117 à 120.

**Indications** : contribue à activer le retour veineux à la marche pour soulager les jambes fatiguées.

**Contre-indications** : intolérance aux matières utilisées.

**Précautions d'emploi** : insérez dans la chaussure, zones de reliefs vers le haut. Ne pas découper. Ne pas utiliser les produits sur une peau lésée. Pour le bon usage, il convient d'utiliser le produit avec des chaussettes et dans des chaussures adaptées. En cas de douleur ou d'inconfort, retirez le produit et consultez votre professionnel de santé. Ne peut se substituer à un produit de compression médicale ni à des semelles orthopédiques. Tout incident grave survenu en lien avec le produit devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

**Recommandations** : retirez toute semelle déjà présente dans la chaussure. Pas de séchage proche d'une source de chaleur. Renouvelez le produit dès les premiers signes d'usure ou après 6 mois d'utilisation quotidienne. Conservez dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conseils d'entretien :

1185



### Composition :

Modèle Classic : 91% polyuréthane, 9% polyester

Modèle Eté : 92% polyuréthane, 8% polyester

Modèle Hiver : 60% polyuréthane, 37% polyester, 3% aluminium

CE Les solutions anti-fatigue Venoped by Sigvaris sont des dispositifs médicaux (règlement 2017/745) fabriqués par Sigvaris. Elles sont destinées à stimuler le retour veineux. Les conditions et les durées de port de ces dispositifs sont à demander à votre professionnel de santé. Ces dispositifs sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à votre professionnel de santé.

© Copyright 2023 by SIGVARIS, Saint-Just Saint-Rambert. Sigvaris, SIGVARIS GROUP and their products are registered trademarks of SIGVARIS AG, CH-9014, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide.

Date de publication : Juin 2023.