

# DELILAH

## NOTICE D'UTILISATION

### Qu'est-ce qu'un collant ou des chaussettes de maintien Delilah by SIGVARIS ?

- Les produits Delilah by SIGVARIS sont des collants ou des chaussettes de maintien (compression dégressive légère).
- Les produits Delilah by SIGVARIS sont des dispositifs médicaux.
- Les collants et les chaussettes Delilah by SIGVARIS exercent une compression dégressive légère qui active la circulation veineuse.

**Indications :** Les collants et les chaussettes Delilah by SIGVARIS sont préconisés pour réduire les sensations de jambes lourdes et /ou fatiguées au quotidien (travail, voyages, loisirs). Attention : ces produits ne peuvent pas se substituer à un produit de compression médicale.

**Contre-indications :** **Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6, phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), thrombose septique, intolérance au produit.**

**Précautions d'emploi :** En cas d'AOMI avec un IPS > 0,6 et < 0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques doit être effectuée. En cas de douleur ou d'inconfort, retirez le produit et consultez votre professionnel de santé. Tout incident grave survenu en lien avec le produit devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

### Recommandations :

- **Lavez le produit avant la première utilisation et quotidiennement.**
- Ne réalisez pas de modification sur le produit.
- **N'utilisez pas les produits sur une peau lésée.**
- Privilégiez l'utilisation de crème hydratante avant le coucher plutôt que le matin avant l'enfilage des produits car elle peut les endommager.
- Les produits doivent être enfilés de préférence dès le matin sur une peau propre et sèche.
- Lors de l'enfilage, veillez à bien placer le talon du produit au bon endroit.
- Manipulez les produits avec précaution pour éviter les accrocs (bagues, ongles...)
- Entretien : N'utilisez pas d'assouplissant. Séchez loin de toute source de chaleur. Pour prolonger la vie de vos produits, utilisez un filet de lavage.



### Compositions :

Chaussettes 70D : 82% polyamide, 18% élasthanne  
Collant 70D : 80% polyamide, 18% élasthanne, 2% coton

Novembre 2023 © Copyright by SIGVARIS, Saint-Just Saint-Rambert. Sigvaris, SIGVARIS GROUP and their products are registered trademarks of SIGVARIS AG, CH-9014, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide.



Version n°2



SIGVARIS  
ZI Sud d'Andrézieux rue B. Thimonnier  
42170 St-Just-St-Rambert, France

