

## Saveti za korišćenje: Navlačenje ▪ Svlačenje ▪ Održavanje

### Važne napomene

- ULCER X ne nositi preko otvorenih rana. Rane moraju biti prekrivene odgovarajućom kompresom za rane.
- Prilikom navlačenja i svlačenja čarapa, uvek nosite specijalne SIGVARIS gumene rukavice. Rukavice Vam pomažu da lakše navučete čarape i štite tkaninu kompresionih čarapa.
- Potčarapa mora da se nosi 24 časa. Natčarapa se navlači nakon ustajanja, a svlači pre odlaska u krevet.
- SIGVARIS ULCER X treba koristiti samo prema uputstvima lekara.
- Nemojte odsecati niti, koje štrče unutar čarapa.
- Zaštitite vašu kompresivnu čarapu tipa TRADITIONAL od krema, ulja i masti (i od losiona za telo), od direktne sunčeve svetlosti, intenzivne svetlosti i velike vrućine. Potčarapa uglavnom nije osetljiva na kreme, ulja, masti i UV-zračenje.

### Navlačenje potčarape

1. Izvrtite potčarapu do visine gležnja, a zatim je pažljivo, kao čarapu, navucite preko gornjeg dela stopala i pete. Zahvaljujući ovoj tehnici izvrtanja, možete biti sigurni da kompresa za ranu neće skliznuti. Uхватite potčarapu za manžetnu i pažljivo je navucite do polovine potkolenice.
2. Raširite tkaninu kompresivne potčarape preko potkolenice tako što ćete je postepeno navlačiti nagore ravnim i nežnim pokretima ruku. Na taj način ćete pravilno raširiti tkaninu po potkolenici bez većeg napora.
3. Raširite tkaninu kompresivne potčarape preko potkolenice tako što ćete je postepeno navlačiti nagore ravnim i nežnim pokretima ruku. Na taj način ćete pravilno raširiti tkaninu po potkolenici bez većeg napora.






### Navlačenje kompresione čarape tipa TRADITIONAL

4. Izvrtite kompresivnu čarapu tipa TRADITIONAL do visine gležnja, a zatim je pažljivo, kao čarapu, navucite preko stopala i pete.
5. Uхватite kompresivnu čarapu tipa TRADITIONAL za manžetnu i pažljivo je navucite do polovine potkolenice.
6. Raširite tkaninu kompresivne natčarape tipa TRADITIONAL i postepeno je navlačite ravnim dlanovima i nežnim pokretima.

### Svlačenje kompresione čarape tipa TRADITIONAL

7. Za svlačenje, uhvatite kompresivnu čarapu tipa TRADITIONAL za gornji rub i povucite manžetne preko pete, skoro do vrha stopala.
8. Ravnim dlanovima klizite preko stopala i pete i tako gurajte čarapu ka vrhu stopala.

### Pravilno održavanje

- Svakodnevno ručno pranje ili pranje u mašini za pranje veša u mrežici za pranje (na programu za osetljivo rublje) na maks. 40 stepeni (za potčarape: maks. 60 stepeni). 
- Za ručno pranje preporučujemo sredstvo za ručno pranje SIGVARIS WASHING SOLUTION (ne koristite prašak za pranje). 
- Ne sušiti u mašini za sušenje veša. 
- Ne peglati. 
- Ne čistiti hemijski. Ne tretirati hemikalijama. 

### Indikacije:

Terapija venskog čira (ulcus cruris venosum) nakon tretmana rane.

### Apsolutne kontraindikacije:

Uznapredovala bolest začepljenja perifernih arterija, kongestivna srčana insuficijencija, septična upala vena, teži oblici venske tromboze.

### Relativne kontraindikacije:

Izrazito vlažne dermatoze, netolerancija na materijal kompresivne čarape, teške alergijske reakcije na ekstremitetima, uznapredovala periferna neuropatija (npr. kod šećerne bolesti), reumatoidni artritis.



Ovaj kvalitetni SIGVARIS proizvod sadrži visokokvalitetnu rafinisanu prirodnu gumu (lateks) koja ne dolazi u direktan dodir sa kožom.

**Ako se pravilno koriste, na medicinsko dejstvo kompresivnih čarapa SIGVARIS daje se garancija od 6 meseci.**